

### ШАГ 1


Вставляете компакт диск в дисковод вашего компьютера или ноутбука (операционная система Windows)

### ШАГ 2

Откройте папку «Мой компьютер»


### ШАГ 3

Открываем папку дисковода двойным нажатием левой кнопки мышки. В таком случае программа просмотрщик (Ez3D-i) откроется автоматически и будет работать с компакт диска, что может вызывать некое «торможение» программы.

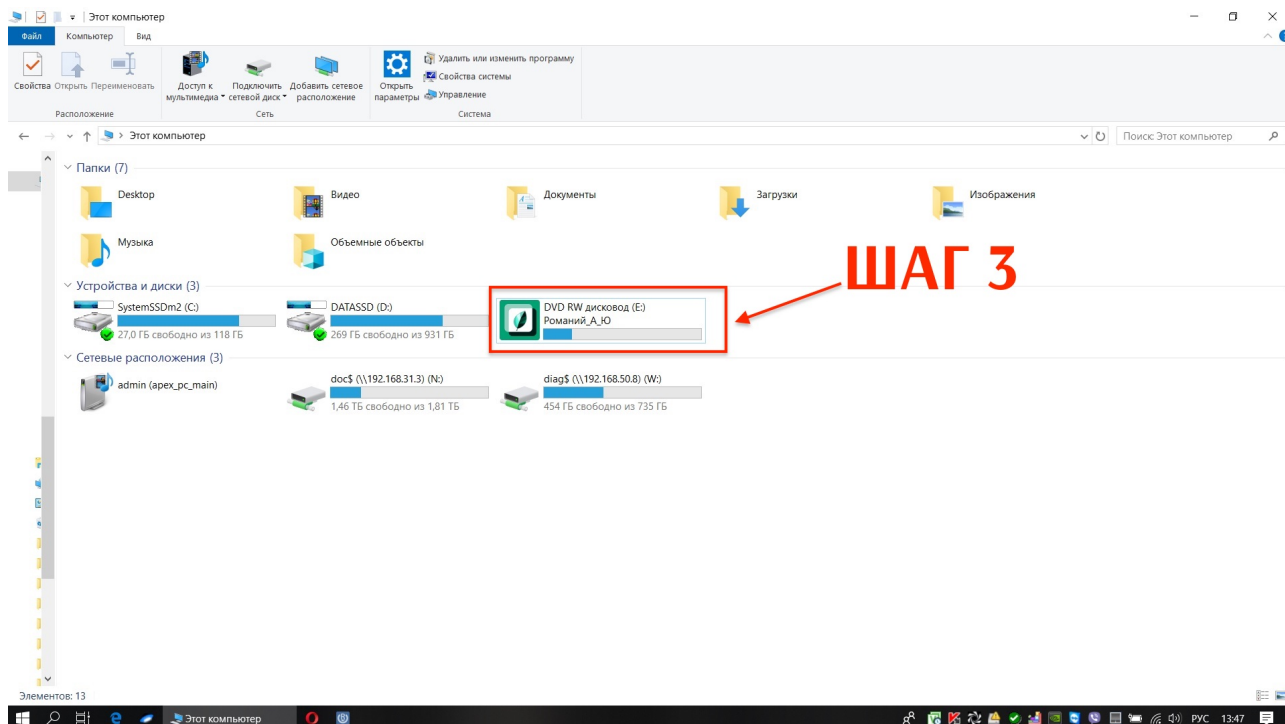

### ШАГ 4

Появится окно выбора работы программы

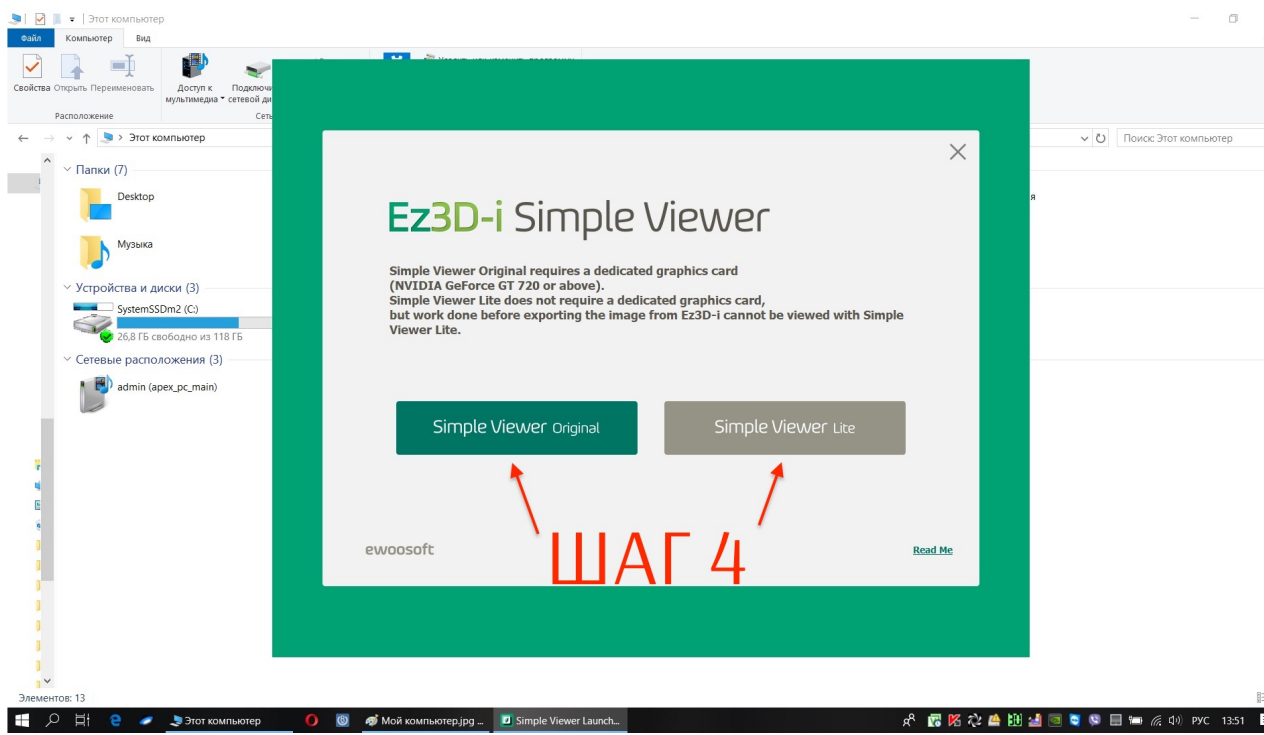

SimpleViewerOriginal подходит для более мощных современных компьютеров. Это последняя версия программы просмотрщик с расширенным функционалом.


SimpleViewerLite подходит для большинства компьютеров и ноутбуков.

Выбираем подходящую версию программы и запускаем ее.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ!

Для более быстрой работы программы мы вам рекомендуем скопировать содержимое диска на компьютер и открывать исследование уже после копирования с компьютера, а не компакт диска.

В таком случае после копирования вы должны открыть папку содержащую исследование и нажать SimpleViewerLauncher.exe

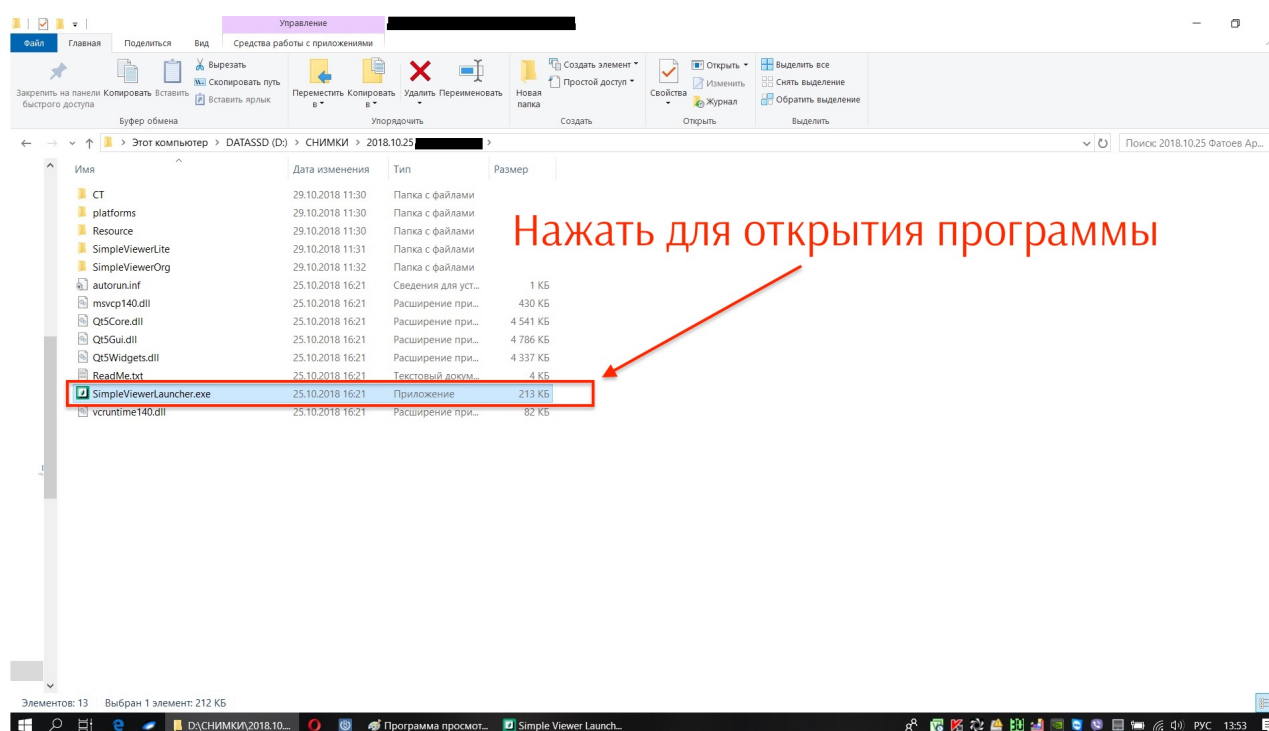

Далее переходим к ШАГу 4

В случае возникновения вопросов вы можете связаться с нами по номеру телефона:

+7(978)7178387